


MASCHERINA FILTRANTE MONOUSO

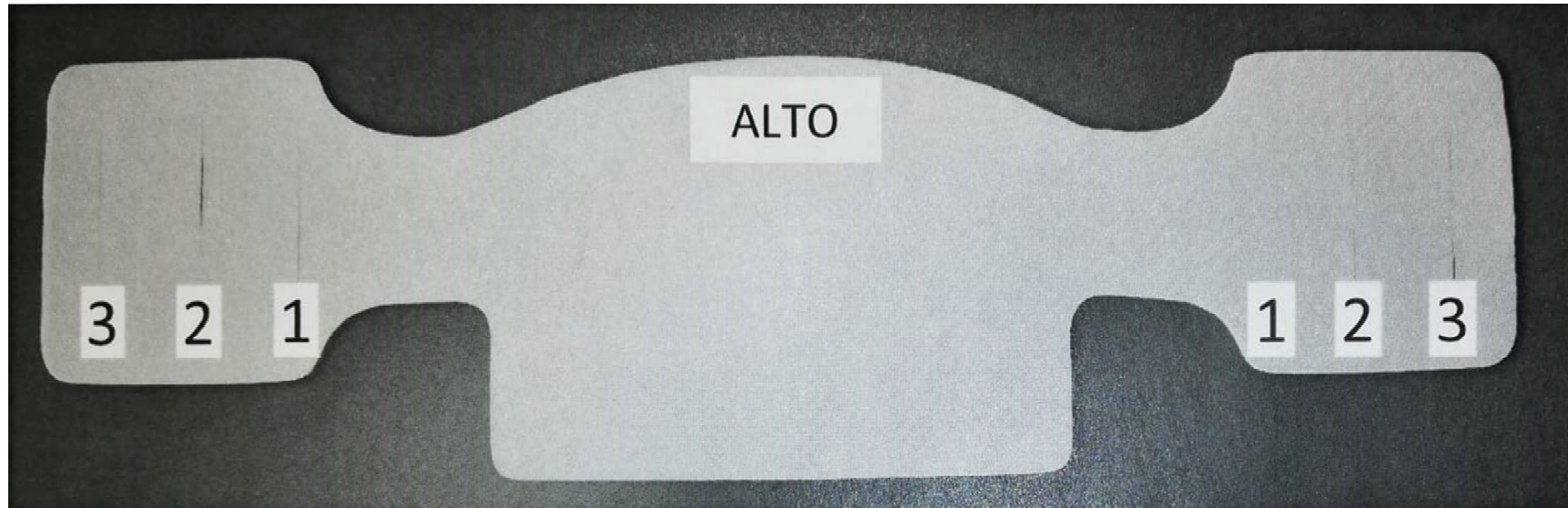

Modalità per indossare lo *schermo protettivo*

- Le operazioni vanno eseguite con mani pulite.
- Determina la misura del volto: 1 più piccolo, 3 più grande.
- Togliere gli eventuali occhiali.
- Infilare un orecchio nella feritoria prestabilita e tendere lo schermo fino all'altro orecchio.

AVVERTENZE

Gli schermi protettivi:

- a) Non sono da considerare presidi medici, né dispositivi di protezione individuale in quanto non garantiscono la protezione dei suoi utilizzatori dal contagio di agenti patogeni, ne garantisce il mancato contagio da agenti patogeni ad altri soggetti;
- b) Non sono adatti all'uso dei bambini sotto i 3 anni di età;
- c) Mirano ad assicurare maggior protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone;
- d) Sono strettamente personali e non è in alcun modo consentito un uso promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare;
- e) Non sono lavabili;
- f) Una volta utilizzati vanno gettati nel secco non riciclabile, il sacchetto del secco andrà conferito dopo almeno 15 giorni dalla sua chiusura.